



# 经络通仪的操作流程

## Процесс выполнения процедуры

- 凤凰商学院  
Международный  
бизнес-колледж Fohow



# 1、Подготовка к процедуре Биоэнергорегуляции 使用前的准备工作



## 1. Необходимый инвентарь:

Анкета, тонометр, одноразовые и токопроводящие перчатки, массажный гель, энергетический бальзам, пищевая пленка, эликсир феникс, сладкая конфета, стакан теплой воды, одноразовая простыня, полотенце, тапочки, сухие салфетки, удлинитель, небольшой таз для воды.

### 物料准备:

体验表、血压计、内外手套、按摩膏、能量王、保鲜膜、口服产品、糖果、温开水、一次性床单、毛巾、浴巾2条、拖鞋、纸巾、接线板、小水盆。

## 2. Требования к соблюдению гигиены:

Использовать новые перчатки и полотенце для каждого человека

### 卫生要求:

手套、浴巾专人专用。

## 2、Противопоказания ! 禁忌症 !



1. Значительное ослабление функций сердца, легких, почек;  
心、肺、肾功能严重衰弱者;
2. Злокачественные опухоли;  
恶性肿瘤患者;
3. Острые инфекционные заболевания;  
急性传染病患者;
4. Различные геморрагические заболевания, сопровождающиеся кровотечением;  
各种出血性疾病出血期;
5. Беременность и менструальный период;  
妇女妊娠期、月经期间;
6. При старческой немощности, переутомлении, сильном голоде, в течение 30 минут после обильного приема пищи, после употребления алкоголя, Во время грозы;  
年老体弱、过度疲劳、过度饥饿、饱餐后半小时内、醉酒者、雷雨天气不做;



# Противопоказания ! 禁忌症



7. Наличие в теле инородных предметов ;  
体内埋有异物；
8. Реабилитационный период после перенесенных операций на сердце, либо серьезные пороки сердца;  
心脏病手术后恢复期及严重器质性心脏病患者；
9. Тяжелые формы гипертонии (нижнее давление более 110, верхнее давление более 160 );  
严重高血压(低压高于110mmHG,高压超过160mmHG)以上者；
10. Остеопороз и ломкость костей;  
骨质疏松及易骨折者；
11. При дефектах развития или дегенеративном сужении  
椎管发育畸形、椎管骨性狭窄、椎间孔明显缩窄者；
12. При дефектах развития или дегенеративном сужении  
Другие крайне тяжелые заболевания.  
其他危重病患者。





## 7. Различные реакции по улучшению: FONOW®

### 好转反应:

1. Сильное утомление, сонливость, метеоризмы- разжижение крови, липиды, холестерин, химические вещества, лекарственные препараты, загрязнение крови, повышенная кислотность сред организма.

疲倦、想睡、屁多—在溶解血液、体液中的脂肪、胆固醇、化学物、西药、血液处于混浊状态, 酸性体质严重;

2. Жар в теле, температура- регуляция иммунной системы

全身发热、发烧—身体在重新调整免疫系统;

3. Запор, диарея - регуляция работы толстого кишечника, выведение токсинов и шлаков.

便秘、腹泻—调节肠道机能, 肠蠕动增加, 排出肠内积存物;

4. Бессонница, либо очень непродолжительный, неглубокий сон, без ощущения сонливости или усталости - регуляция состояния нервной системы.

失眠、睡的少、不觉的累—调整植物神经紧张状态;

5. Появление красной сыпи, иногда сопровождающейся зудом - выведение токсинов из организма

生疮、皮肤出现红疹、痒—身体在排热排毒;



**6. Слезотечение, сухость во рту, трещины на губах - выведение токсинов из печени, восстановление функций печени**

流泪、口干舌燥、嘴唇爆裂—是肝脏排毒的现象，修复的反应；

**7. У людей, которые на протяжении длительного времени принимали лекарственные препараты, могут появиться язвы в ротовой полости или боли в горле - это проявление реакции на выведение токсинов и остатков лекарственных препаратов из крови и печени.**

口腔内反复溃疡或喉咙痛—是长期服用西药的人，累积在血液、肝脏及体内的西药化学物质排出现象；

**8. Головокружение, головные боли - растворение липидов и холестерина в кровеносных сосудах головного мозга, изменения в кровоснабжении и снабжении кислородом.**

头昏，头痛—溶解脑部血管内血脂或胆固醇，脑部供血供氧发生改变；



**9.Неприятный запах ног, изменение цвета и запаха мочи (выход токсинов)**

脚气、尿蛋白—排出胃寒的现象；

**10.Вздутие живота, наличие крови при испражнении кишечника, темный кал - симптомы очищения и восстановления организма**

腹胀、便血、排黑便—大肠排毒、修复的反应；

**11.Головокружение, дискомфорт либо звон в ушах - как реакция положительного воздействия на работу сердца**

眩晕、耳前听宫穴肿胀—小肠排毒, 修复心脏的反应；

**12.Повышение давления - как положительное воздействие на стенки сосудов**  
血压增高—修复血管壁、斑块脱落的反应；

**13.Чувство голода, возникающее после процедуры указывает на улучшение работы желудка и селезенки**

感觉饿—脾胃运化功能增加；

**15.Высыпания - выход патогенного фактора Ветра из организма**

出疹子—排出体内的湿气, 水溶性毒素；



## 八、Уход за прибором 设备保养



1. После окончания процедуры отключите прибор от источника питания, не оставляйте прибор подключенным к питанию на длительное время

1、使用结束后及时关闭电源，不要让设备长时间处于带电状态；

2. Соберите все провода и комплектующие, вытрите влагу и масло с корпуса прибора, содержите прибор в чистоте

2、收好配线及配件，擦拭干净仪器表面的油水污渍，保证设备洁净干燥





## 5、Диагностика по спине: 背诊方法:



На спине имеются рефлекторные зоны связанные со всеми внутренними органами, они начинаются на расстоянии 2 дюймов от шеи и имеют размер ладони. Порядок их расположения сверху вниз:

后背为五脏六腑的反射区，从颈下二寸开始，以手掌大小为一个反射区

- Легкие 肺区
- Сердце 心区
- Печень 肝区
- Селезенка 脾区
- Почки 肾区
- Выделительная система 泌尿区
- Репродуктивная система 生殖区





## ДИАГНОСТИКА ПО СПИНЕ

Цвет, наличие прыщей или высыпаний, состояние пор, неровные поверхности (слишком выпуклые, либо вогнутые), наличие растяжек  
颜色、长痘痘、毛孔粗大、突出来、凹进去、横纹线

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ:

产品配备方案:

Область легких: Эликсир Феникс, Эликсир Санцин, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

肺区: 口服液、三清、海藻钙、六味茶。

Область сердца: Эликсир Феникс, Эликсир Санцин, капсулы Линчжи, капсулы Сюэчинфу, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

心区: 口服液、三清、灵芝、血清夫、海藻钙、六味茶。

Область печени и желчного пузыря: Эликсир Феникс, Эликсир Санцин, капсулы Линчжи, капсулы Сюэчинфу, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

肝胆区: 口服液、三清、灵芝、血清夫、海藻钙、六味茶。

Область желудка и селезенки: Эликсир Феникс, Эликсир Санцин, Паста Роза, пастилки Гаосен, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

脾胃区: 口服液、三清、寡糖、高纤、海藻钙、六味茶。



Область почек: Эликсир Феникс, Эликсир 3 Драгоценности, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

肾区: 口服液、三宝、海藻钙、六味茶。

Область тонкого и толстого кишечника: Эликсир Феникс, Эликсир 3 Драгоценности, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй

大小肠区: 口服液、三清、寡糖、海藻钙、六味茶。

Область моче-половой системы: Эликсир Феникс, Эликсир 3 Драгоценности, Эликсир Санцин, Кальций Хай Цзаогай, чай Лювэй, тампоны Гуй Фэйбао

泌尿生殖区: 口服液、三宝、三清、海藻钙、六味茶、贵妃宝。

# 1. проработка меридиана Ду-

май:



# 1

Очистка заднесрединного меридиана Ду-май :

Да-Чжуй → Хуань-Тяо

Основные требования: движение начинается от точки Да-чжуй и заканчивается в точке Хуань-тяо. Одна рука помещается в область БАТ Да-Чжуй, вторая рука следует за первой. Ладони плотно прилегают к телу, скорость движений медленная. Достигаем руками нижней части копчика, разводим руки в стороны, фиксируем в точках Хуан-Тяо на 10 секунд. Соединяем большие пальцы рук вместе, отрываем руки от тела. Выполняем 9 повторений для мужчин, 8 повторений для женщин.

# проработка меридиана мочевого пузыря :



## 2

Проработка меридиана мочевого пузыря:

С двух сторон от точки Да-Чжуи  Ба-ляо

Основные требования: пальцы рук соединены вместе, руки следуют с двух сторон по энергетическому каналу мочевого пузыря. Ладони плотно прилегают к телу, скорость движений медленная. Руки достигают точек Ба-Ляо, фиксируем их в этой зоне на 10 секунд.

Соединяем большие пальцы рук вместе, отрываем руки от тела. Выполняем 9 повторений для мужчин, 8 повторений для женщин.



# проработка коллатералей Ло-май:



## 3

### Проработка коллатералей Ло-май:

Да-чжуй ➡ Хуань-тяо

Основные требования

Массаж первой зоны: движение начинается от точки Да-Чжуй, через область лопаток руки перемещаются в область подмышечных впадин (в точках Ци-цюань задерживаемся на 10 секунд), резко отрываем руки от тела.

Массаж второй зоны: движение начинается снова от точки Да-Чжуй вниз по коллатералям Ло-май, при этом не должно быть зазора между ладонью и поверхностью кожи.

Массаж третьей зоны: движение начинается от точки Да-Чжуй вниз к опоясывающему меридиану. Выполняем 9 массажных движений.

Перемещаем руки в область точек Ба-Ляо, перемещаем руки на точки Ба-Ляо, фиксируем на 10 секунд. Соединяем большие пальцы рук вместе, отрываем руки от тела.

Выполняем 3 повторения, одинаково и для мужчин и для женщин.

# фиксированное воздействие на точку :



## 4

1. Фиксированное воздействие на точку:

Да-чжуй → Чан-Цзян

Основные требования: одна рука помещается на точке Чан-цян, другая на точке Да-чжуй, при этом необходимо постепенно увеличивать интенсивность (по мере адаптации пациента), при достижении предела необходимо выдержать интервал в 1 минуту, и после этого снизить интенсивность до начального уровня.

2. Фиксированное воздействие на опоясывающий меридиан Дай-май

Основные требования: обе руки располагаются в области точки Мин-мэнь и плотно прижимаются к опоясывающему меридиану Дай-май, интенсивность постепенно увеличивается до появления болевых ощущений в области поясницы, после этого выдерживается интервал в 1 минуту.

3. Фиксированное воздействие на точку Чэн-фу


Основные требования: обе руки плотно прилегают к точке Чэн-фу, интенсивность увеличивается постепенно, до предела чувствительности пациента, затем выдерживается интервал в 1 мин, интенсивность снижается до 18 единиц, большие пальцы рук соединяются вместе, руки отрываются от тела.



# Выведение из точек патогенного фактора



## «ветра»

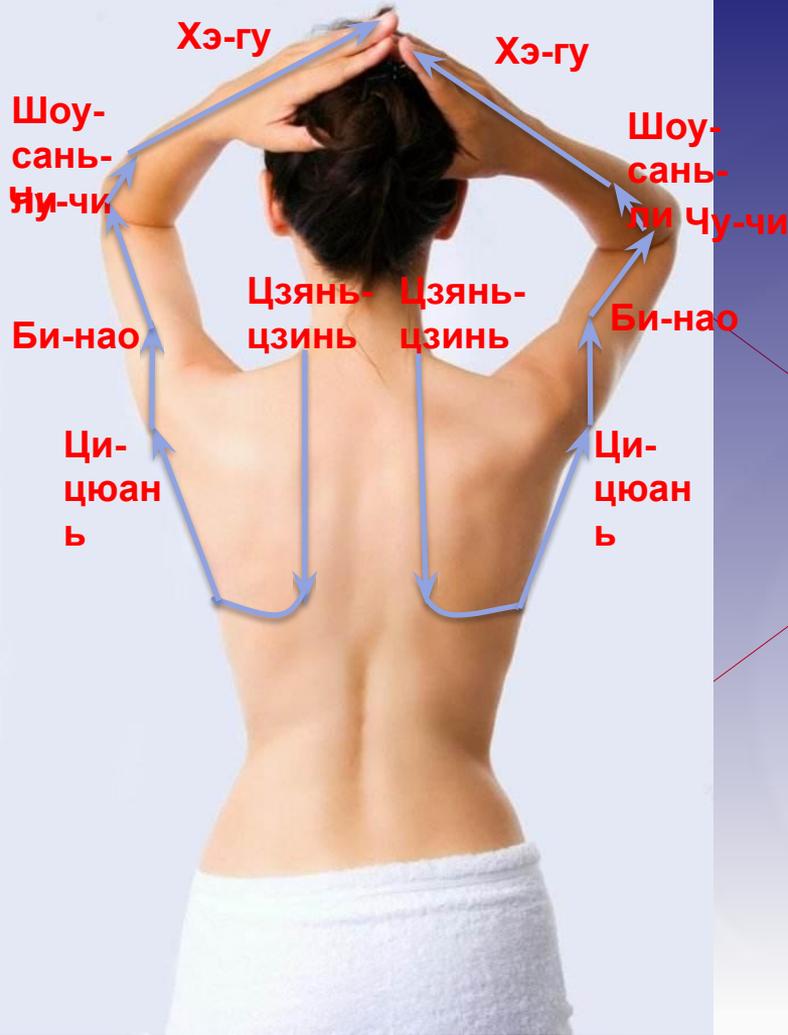

## 5

Выведение патогенного фактора «ветра», путем воздействия на БАТ

Основные требования:

Указательные пальцы обеих рук соединяются на 3 секунды, разъединяются на 5 секунд, выполняем 5 повторений. Перемещаем руки вниз вдоль энергетического канала мочевого пузыря. По внешним границам лопаток перемещаем руки в область точек Ци-цюань, фиксируем их в таком положении на 1 минуту. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Би-нао, фиксируем руки на полминуты. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Чу-чи и Чи-цзе, фиксируем руки на 1 минуту. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Шоу-санли, фиксируем руки на полминуты. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Нэй-гуань и Вай-гуань, фиксируем руки на 1 минуту. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Шэнь-мэнь и Тай-юань, фиксируем руки на полминуты. Плотнo прилегаем руками к телу, перемещаемся на БАТ Хэ-гу и Хоу-си, фиксируем руки на 1 минуту. Скользящими движениями массируем пальцы рук. Начиная с больших пальцев рук, массируем каждый палец на протяжении 3-х секунд.