

Ваша поддержка в жизни

Ассортимент изделий Aurafix для ПОЗВОНОЧНИКА

План

1. Основные причины заболеваний позвоночника.
2. Статистика.
3. Протоколы лечения при боли в пояснице.
4. Механизм действия бандажей.
5. Ткани AURAFIX.
6. Ассортимент корсетов AURAFIX.
7. Подбор изделий.
8. Ситуационные задачи.

Наиболее распространенные боли в пояснице.

→ 3 основных типа причин ...



→ Могут быть сопутствующие факторы.

Другие типы боли в пояснице.



СПОРТ

Боль в результате повторного спортивного движения (катание на лыжах, коньках, волейбол, прыжки с парашютом, теннис и т.д.)



ОСТЕОПОРОЗ

Обусловлена деминерализацией костей.



СПОНДИЛОЛИСТЕЗ


Смещение позвонка вперед или назад по отношению к другим.

Статистика

2 из 3 страдающих ПБ женщины



Повержены все возрастные группы

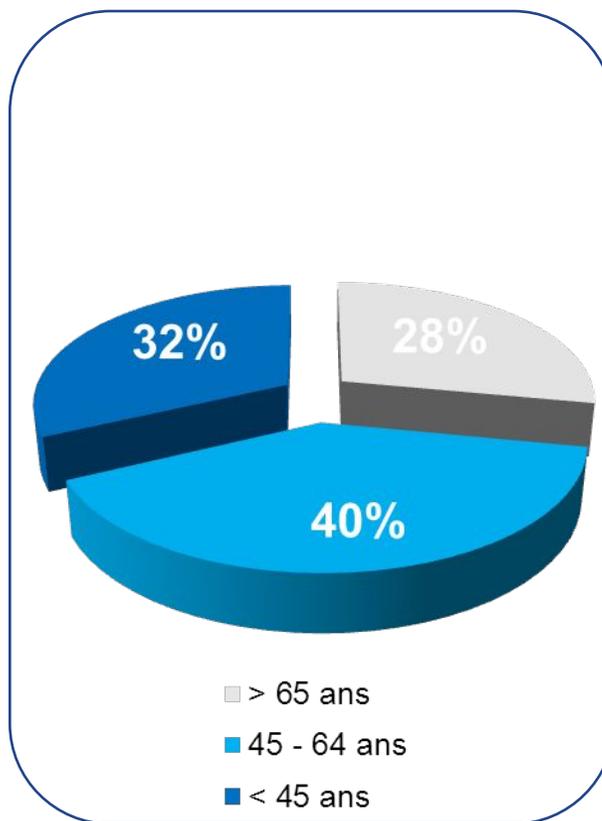

Офисные работники и работники сферы услуг



Что делать при боли в пояснице?

1. Предотвратить проблему до перехода в хроническую боль.
2. Поддерживать возобновление физической активности.



ЦЕЛЬ: ограничить влияние боли на социальную жизнь пациента (время работы, изоляции, депрессии и т.д.)

Протокол лечения боли в пояснице.

Для пациентов, страдающих острой ПБ

ДИАГНОЗ:

История болезни и клинические обследования.

Предотвращение перехода
ПБ в хроническую

Терапия:

- Избежать назначения постельного режима.
- Облегчить боль НПВС.
- Возможно использование мышечных релаксантов.

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ




Полный или
Частичный отдых
поясницы

1



Функциональная
реабилитация 3

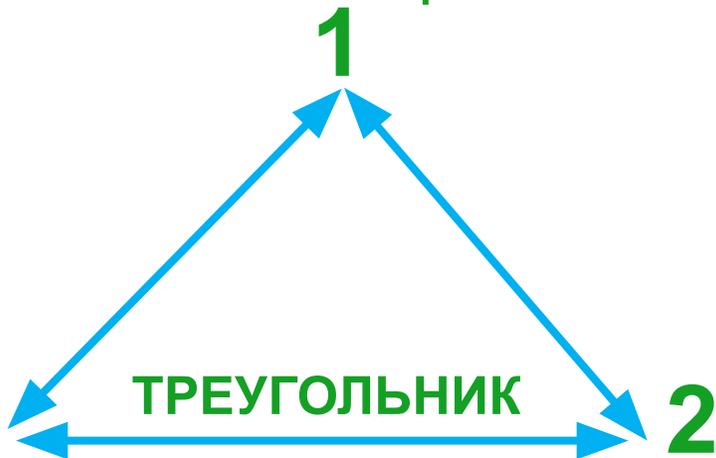


2
Мед. препараты
Обезболивающие,
Противовоспалительные,
Мышечные релаксанты

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ БАНДАЖА



Без бандажа

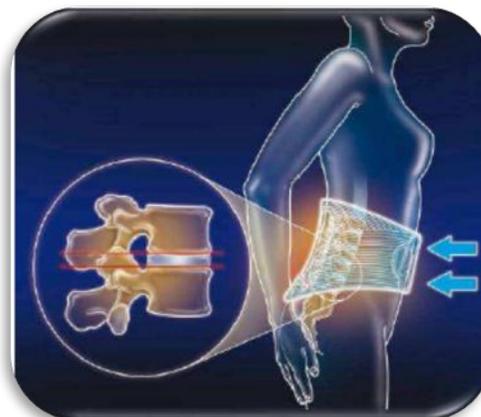

С бандажом

1

Повышение внутрибрюшного давления



... Для лучшего распределения нагрузки на дисках



... Которое сразу же разгружает поясницу

2

Ограничение движений



... Выступает в качестве упругой опоры



... Которая восстанавливает хорошую осанку и корректирует гиперлордоз

3

Улучшает проприоцепцию



... Стимулирует сенсоры кожи



Ингибирование боль ощущается благодаря "управления затвором" механизм

Особенности корсетов AURAFIX

Моделируемые ребра из гибкой стали

→ Для подгонки под каждого пациента




Петли для пальцев

→ Для облегчения надевания.




Дышащие материалы!

→ Для комфорта при ношении.

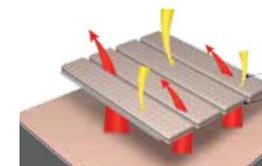


ТКАНИ AURAFIX: Легкость и Прочность

Материал AURACTIVE

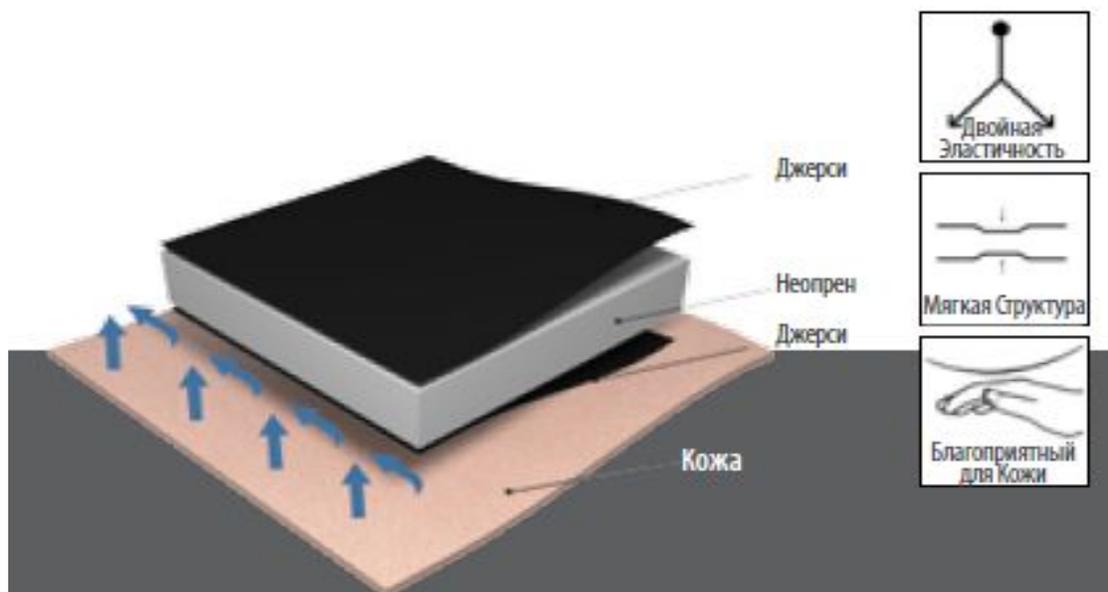

Сэндвич-материал:
Неопрен и нейлон.
Максимальный
компрессионный и
теплосберегающий
эффект.

ТКАНИ AURAFIX: Легкость И Прочность

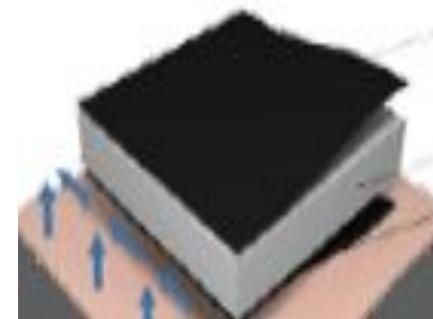

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: 201

Легкая степень фиксации

Материалы:	Изделие выполнено из триплированного материала. В составе неопрен и нейлон.
Дополнительные ремни:	Для улучшения компрессии и прилегания к телу.
Особенности:	Благодаря составу – отличный согревающий эффект.

РАЗМЕРЫ

От 75 см до 125см
5 размеров
Высота 26см




**ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ**



**« АКТИВНЫЕ ЛЮДИ В
ВОЗРАСТЕ »**


Легкая степень фиксации

- Дегенеративно-дистрофические изменения в поясничной отделе позвоночника.
- Хронические боли в пояснице.
- Профилактика радикулита.

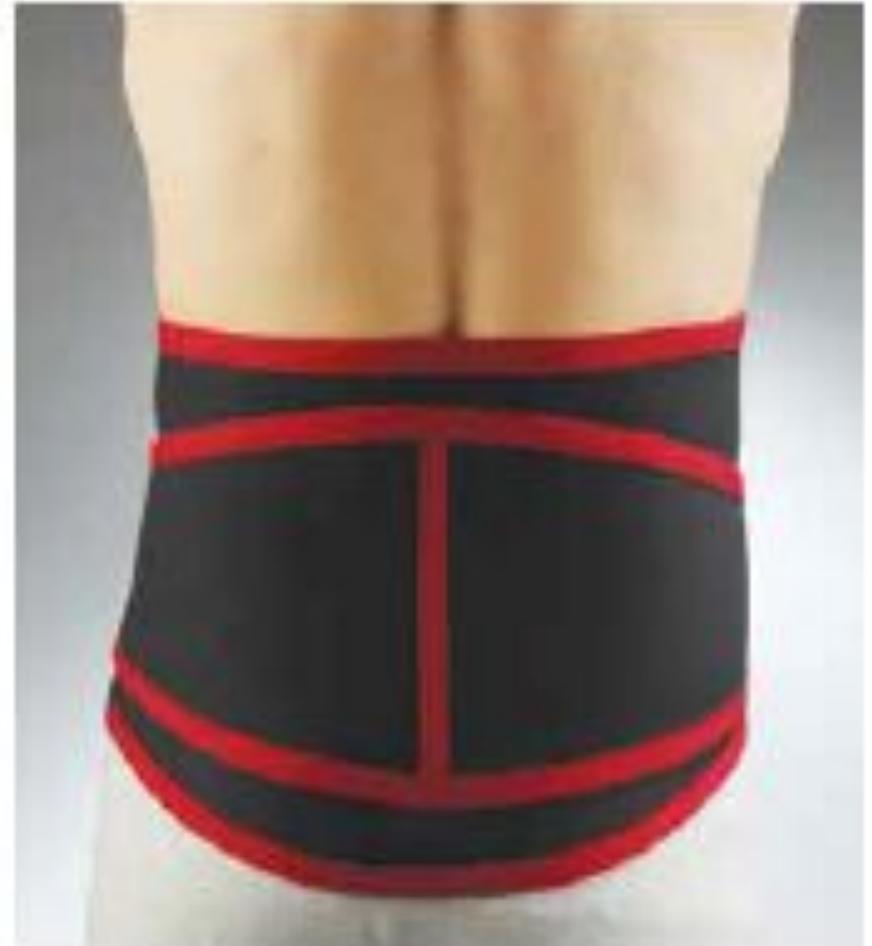


ТКАНИ AURAFIX: Комфортная и дышащая

Материал AURAFLEX

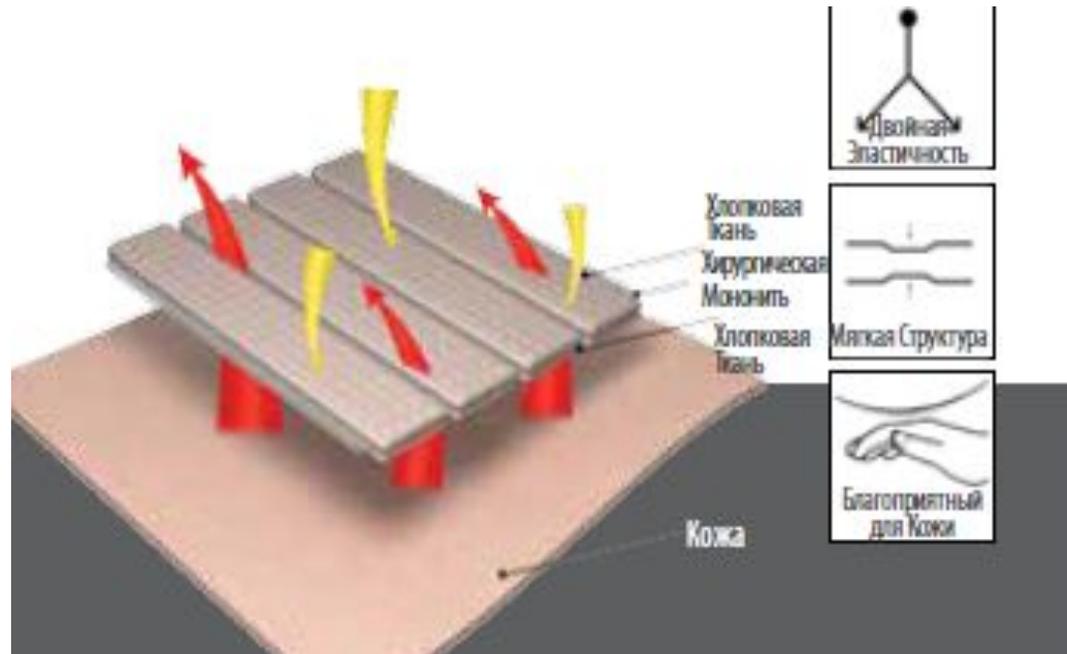

Бандажная лента
которая состоит из
хлопка полиамида
и латекса.

ТКАНИ AURAFIX: Комфортная и дышащая.

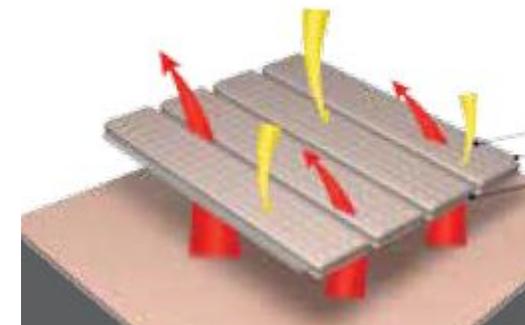

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: АО-80 с ремнем (26 см)

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: АО-81 с ремнем (32 см)

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ

Характеристики изделия.

Материалы:	Изделие выполнено из нейлона и эластана.
Ребра жесткости:	2 ребра металл; 4 ребра пластик.
Особенности:	две пары дополнительных эластичных стяжек. 2 модели для людей разного роста.

ЦВЕТА

БЕЖЕВЫЙ



РАЗМЕРЫ

От 75 см до 125см

5 размеров

Высота 26см

Высота 32 см

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: АО-80 с ремнем (26 см)

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: АО-81 с ремнем (32 см)



Показания к применению:

- Люмбаго.(острая боль в пояснице)
- Дегенеративно-дистрофические изменения в поясничной отделе позвоночника.
- Спондилолистез.
- Хронические боли в пояснице.



ТКАНИ AURAFIX: Незаметная и комфортная.

Материал AURADINAMIC

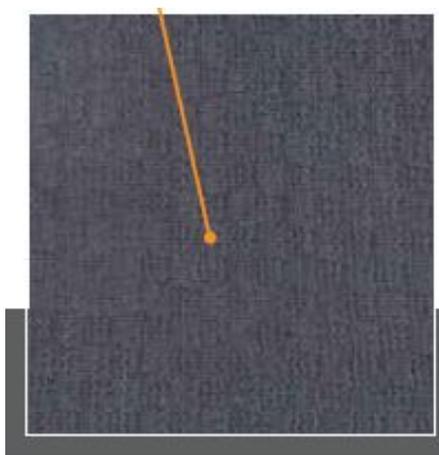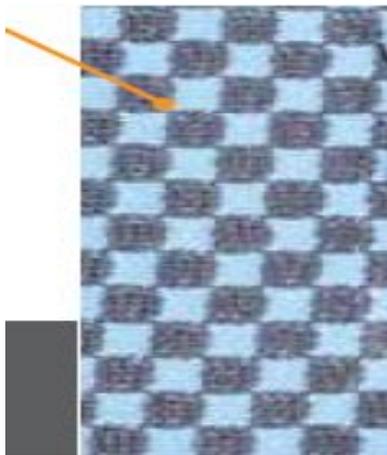

Плосковязанная
ткань состоящая из
эластана и
полиамида.

ТКАНИ AURAFIX: Незаметная и комфортная.



Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: AO-88

ЦВЕТА
черный

Материалы:	Изделие выполнено из полиамида и эластана.
Рёбра жесткости:	4 рёбра металл;
Особенности:	клапаны из плотного нерастяжимого материала на передней поверхности изделия. Эффект «второй кожи»



ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ



«сотрудники офиса»

Пояснично-крестцовый корсет Aurafix REF: AO-88

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ

- Дегенеративно-дистрофические изменения в поясничной отделе позвоночника.
- Острые боли в пояснице.
- Протрузии, грыжи диска.



РАЗМЕРЫ

От 75 см до 125см

5 размеров

Высота 26см

Корсет для спины люмбостад Aurafix REF: AO-61

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

Материалы:	Изделие выполнено из нейлона и эластана.
Рёбра жесткости:	4 ребра металл;
Особенности:	Дополнительный усиленный ремень Поддержка, которая может быть скорректирована к боли

**ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ**



**« АКТИВНЫЕ
ЛЮДИ С
СИЛЬНОЙ
БОЛЬЮ »**

**ЧЕРНЫЙ
(26CM)**

РАЗМЕРЫ

От 75 см до 125см
5 размеров
Высота 26см



Корсет для спины люмбостад Aurafix REF: АО-61

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

- Люмбаго.
- Дегенеративно-дистрофические изменения в поясничной отделе позвоночника.
- Спондилолистез.
- Грыжи диска.
- Острые и хронические боли в пояснице.



Пояснично-позвоночный корсет Aurafix REF: AO-92

Материалы:	Изделие выполнено из нейлона и эластана.
Ребра жесткости:	2 ребра металл;
Особенности:	нерастяжимые реклинирующие ремни с мягкой несмещаемой вставкой

РАЗМЕРЫ

От 75 см до 125см
5 размеров
Высота поясничной части 26см

Цвета:
бежевый



Пояснично-позвоночный корсет Aurafix REF: AO-92

- Дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике.
- Остеохондроз.
- Грыжи дисков в грудном отделе.
- Остеопороз.
- Переломы тел позвонков.



Алгоритм выбора корсетов



ПОДБОР ИЗДЕЛИЙ

ОПРОС

ЦЕЛЬ: определение потребности пациента


- Профиль пациента: морфология, тип боли в пояснице
- Боль: место, интенсивность, частота ...
- Уровень физической активности



СНЯТИЕ ЗАМЕРОВ

ЦЕЛЬ: Подобрать правильный размер

- Измерение талии выполняется на уровне пупка
- Определение правильной высоты: 21 или 26 см
 - В зависимости от роста пациента: < или > 1,6 м
 - В зависимости от условий ношения: Сидя или стоя

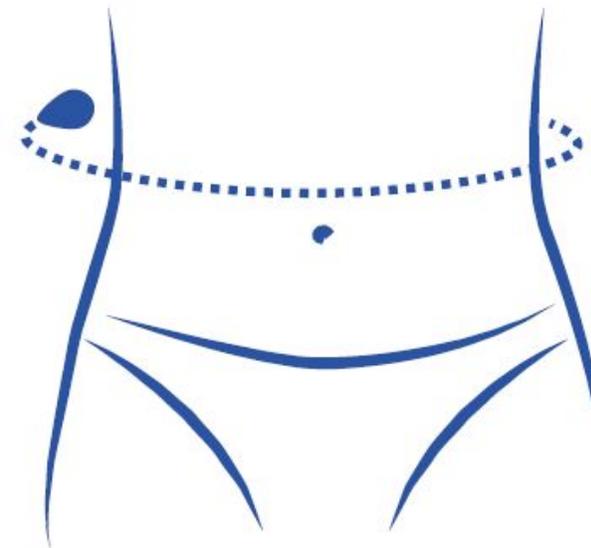

ПРИМЕРКА

ЦЕЛЬ: Оптимальная комфорт при ношении

- Моделирование ребер: Адаптация к искривлению поясничного отдела.
- Примерка в положении сидя.
- Выравнивание задней части бандажа по позвоночному столбу.

Уход за изделиями



Повезло же мне

Стирка БЕРЕЖНАЯ

теперь вот ЭТО

потом утюжить вздумает?

Создай свою котоматрицу на kotomatrix.ru

- Изделия стирают вручную, в тёплой воде температурой не выше 30°С
- Для стирки рекомендуется использовать деликатные моющие средства или мыльный раствор
- Запрещено применение отбеливающих или хлорсодержащих моющих средств
- Не рекомендуется выкручивать, сильно растягивать и отжимать изделия во время и после стирки
- Для сохранения лечебных свойств изделия необходимо сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Анна

Она собственник компании, страдает от легкой боли в спине, но не хочет носить корсет, так как, он ей кажется слишком громоздким.

- Анна работает в требовательной профессиональной среде, где она не может позволить себе показать какие-либо признаки слабости.
- Ее боль, очевидно, относительно слабая.



**Пояснично- крестцовый
корсет Aurafix REF: AO-88**

Игорь



Он разнорабочий, который работает на строительных объектах. Он регулярно страдает от приступов боли в пояснице и пришел, чтобы купить согревающий пояс.

- Работая на строительных объектах он часто работает в подвалах и ямах где холод и сырость.

**Пояснично-крестцовый
корсет Aurafix REF: 201**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!